

LOJER®

For easy care



Desiplint

Triple-Effect Cleaning Agent

DESIPLINT

Kolmitemhoinen puhdistusaine / Trippel-effekt rengöringsmedel / Triple-Effect Cleaning Agent / Чистящее средство тройного действия

Käyttöohje: Suihkuta sumutinpullolla hoitopöydän pintaan Desiplint-puhdistusainetta. Anna aineen vaikuttaa hetken ja pyyhi pois kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. Kun hoitopöytä on puhdistettu ja desinfioitu, pöydän pinta säilyttää pehmeytensä ja käyttöikä pitenee.

VAROITUS: Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Vältettävä sumutteen hengittämistä.

Bruksanvisning: Spruta med Sprayflaskan på behandlingsbänken. Låt verka en stund och torka av med torr duk. På detta sätt håller sig ytan ren och desinfikerad samt förlänger bänkens livslängd.

WARNING: Farligt för ögonen. Skydda ögonen och undvik inandning av aerosolen.

Instructions: Spray Desiplint on the surface to be cleaned, wait for the detergent to take effect, then wipe away with a dry, lint-free cloth. Cleaning and disinfecting with Desiplint keeps the surface soft and extends the life of the table.

WARNING: Avoid contact with eyes. Avoid inhalation of spray.

Инструкции по применению: Распылить Desiplint на поверхность, предназначенную для чистки, дать средству впитаться, затем вытереть поверхность сухой тряпкой из нетканного материала. Использование средства Desiplint значительно продлит срок службы кожаменителя массажного стола.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания в глаза и дыхательные пути.

Sisältö / Innehåll / Contents / Ингредиенты:
Aqua pur., chlorhexidine digluconate

Markkinoija / Tillverkad för / Marketing / Изготовлено для:
Lojer Oy, 38201 Sastamala
Tel. +358 (0)10 830 6785, info@lojer.com, www.lojer.com

Marknadsförs i Sverige av: Medema Physio AB
Tel. 08 404 12 00, info@medema.se, www.medema.se

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer / Производитель:
Frescon Oy, Vikinraitti 5, 33880 Lempäälä

Made in Finland

☐ 500 ml



6 430022 970205

☐ 5000 ml



6 430022 970212